

Orthesen Formmasse



SICASIL SOFT

Zweikomponentige Silikonformmasse für **mittelweiche** Orthesen

- Vorteile, Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitung wie SICASIL, jedoch Härte **20 Shore**

Artikelnummern:

4005	2 x 250 gr. SICASIL SOFT A und SICASIL SOFT B
------	---

SICASIL SUPER SOFT

Zweikomponentige Silikonformmasse für **weiche** Orthesen

- Vorteile, Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitung wie SICASIL, jedoch Härte **16 Shore**

Artikelnummern:

4006	2 x 250 gr. SICASIL SUPER SOFT A und SICASIL SUPER SOFT B
------	---

SICASIL

Zweikomponentige Silikonformmasse für **feste** Orthesen. **Vorteil von SICASIL:**

- Einfache Dosierung der zwei Komponenten
- Hohe Elastizität
- Ungiftig
- Härte 34 Shore

Anwendungsmöglichkeiten

- Besonders geeignet für Korrekturen und Kinderfußorthesen

Verarbeitungsanleitung

Nehmen sie die gleiche Dosierung der beiden Komponenten (SICASIL A und SICASIL B) in die Hand. Kneten Sie die Masse ca. 60 Sekunden lang gut durch, bis Sie eine homogene Paste bekommen. Die Mischung bleibt ca. 5 Minuten lang anwendbar. Sie können nach dem Aushärten sofort modellieren und schleifen.

Artikelnummern:

4000	2 x 250 gr. SICASIL A und SICASIL B
------	-------------------------------------

SICALFLEX

Flexible Silikonmasse

- Orthesenverstärkung
- Druckschutzpolsterung
- Polsterung zur Optimierung des Tragekomforts
- Reparatur oder Verklebung von Orthesen

Artikelnummern:

4001	SICALFLEX
------	-----------